

内容物



固定用ベルト




アジャスター (フェイスシールド5枚につき1枚梱包)

フェイスシールド





組立て方


1

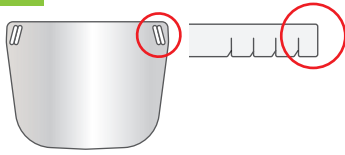

ベルトをシールドの両方の穴に内側から外側へ通します。

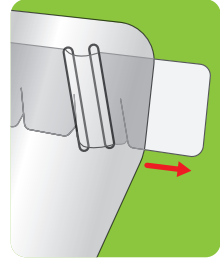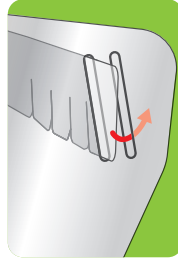


2


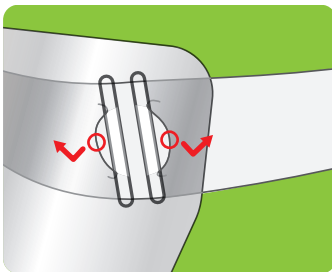


シールドの穴にベルトの留め具を引っ掛けて固定します。

3

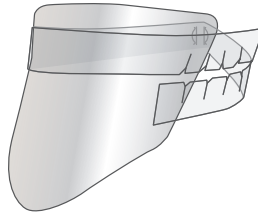

帯の後ろ部分で、頭の大きさに合わせて調整できます。

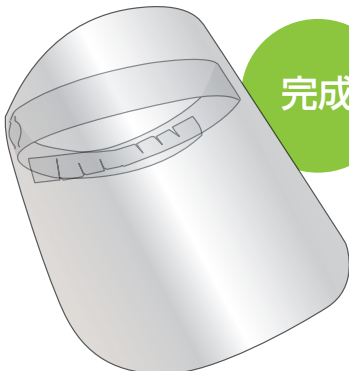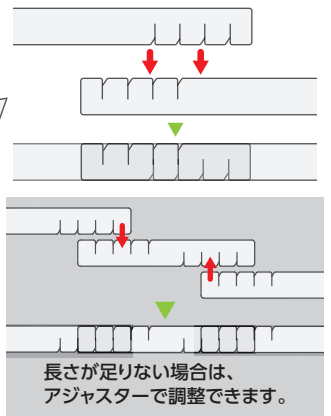

【ご使用上の注意】

- 商品は曝露等を防止する目的のもので完全にウイルスを防ぐものではありません。
- シートの端で手指を傷つける可能性がありますので注意してご使用ください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 睡眠時のご使用はおやめください。
- 火気のそばでのご使用はおやめください。
- 本品をご使用後は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。